

Product Information

ホーム PD システム かぐや ソフトウェアバージョン(SW2.10.13-1)の変更内容及び遠隔ソフトウェア更新のご案内

謹啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛用賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記のとおり自動腹膜灌流用装置「ホーム PD システム かぐや」(以下「かぐや」と省略します)の改善されたソフトウェアバージョン(SW2.10.13-1)の変更内容及び、遠隔ソフトウェア更新の手順についてご案内いたします。

何卒ご理解いただき、今後とも引き続き一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 当該製品

品番	販売名	承認番号
T5C8500	ホーム PD システム かぐや	22800BZX00454000

2. SW2.10.13-1 の変更内容と変更の目的


No	新(SW2.10.13-1)	旧(SW2.10.4-1)	変更の目的
1	データ通信機能の更新	--	かぐやとシェアソース間のデータの流れを管理するために動作するミドルウェアアプリケーションのセキュリティ強化
2	カセットのバルブ動作の最適化	--	カセットバルブの動作見直しによるかぐやのエラー23115 発生の低減
3	加温部ヒーター動作の最適化	--	加温部ヒーターの動作見直しによるかぐやのエラー01309 発生の低減

3. 変更方法

現在医療機関や患者さん宅でお使いの「かぐや」を、通信回線を利用して遠隔操作でソフトウェア更新を行います。その際、ご使用者に行っていただく操作内容を説明した印刷物を「遠隔ソフトウェア更新の手順 2：07-19-78-315E1JPN」として準備いたしました。担当 MR 経由でお渡しいたします。

4. 製品の出荷開始時期

改善されたソフトウェアバージョン(SW2.10.13-1)を搭載した「かぐや」の各倉庫からの出荷は 4 月中旬頃より開始される予定です。なお地域ごとに出荷開始時期が多少ずれることが予想されますことをご了承ください。

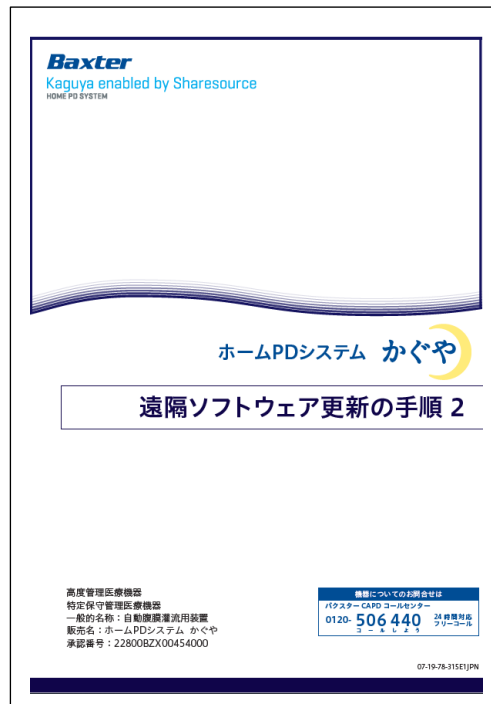

5. 遠隔ソフトウェア更新の開始時期

お手元の「かぐや」は、改善された SW2.10.13-1 へ下記の医療機関の所在地毎に遠隔ソフトウェア更新を開始させて頂く予定です。下記、遠隔ソフトウェア更新が可能な期間内に、別紙「遠隔ソフトウェア更新の手順 2：07-19-78-315E1JPN」に従い、遠隔ソフトウェア更新を完了頂きますようお願い申し上げます。

医療機関の所在地	遠隔ソフトウェア更新が可能な期間	
	1 回目	2 回目
埼玉 千葉 東京 神奈川	5月9日(火)～ 6月5日(月)	6月13日(火)～ 7月10日(月)
富山 石川 福井 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山	5月16日(火)～ 6月12日(月)	6月20日(火)～ 7月17日(月)
兵庫 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄	5月23日(火)～ 6月19日(月)	6月27日(火)～ 7月24日(月)
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 新潟 茨城 栃木 群馬 山梨	5月30日(火)～ 6月26日(月)	7月4日(火)～ 7月31日(月)


6. 遠隔ソフトウェア更新の方法

遠隔ソフトウェア更新は、「かぐや」の電源の入り切り、画面の確認およびボタンを押すといった簡単な手順以外は、自動で行われます。また、ソフトウェアのダウンロードとインストールの2つの部分に分けて二日間で行われます。ソフトウェア更新を行う際は、以下のようなスケジュールで行っていただきますようお願い申し上げます。手順の詳細は、別紙「遠隔ソフトウェア更新の手順2：07-19-78-315E1JPN」をご参照ください。

■ 1日目: 治療を実施した後ソフトウェアをダウンロード



■ 2日目: 治療を実施した後ソフトウェアをインストール

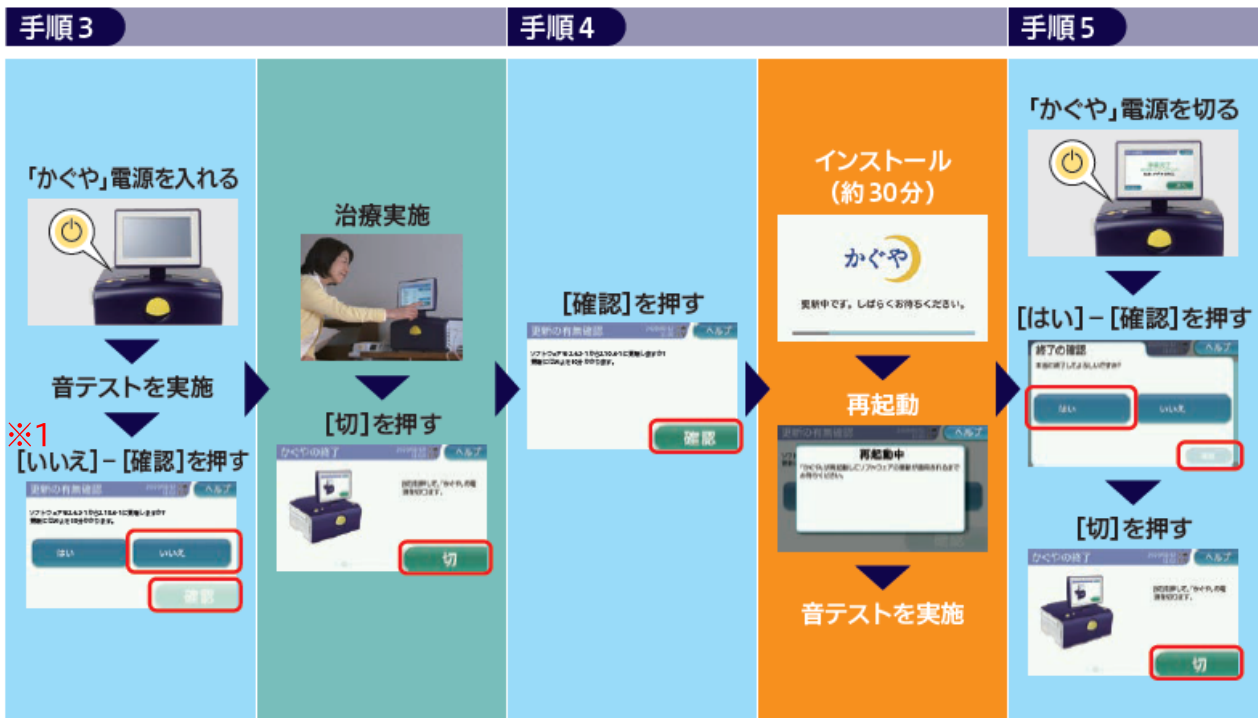


凡例 □ 患者さんの操作 □ ダウンロード □ 治療 □ インストール

※1 [更新の有無確認] 画面 での操作です

以上

【ご参考】 ホーム PD システム かぐやのソフトウェアバージョンの確認方法:

- ① かぐや本体：[ホーム画面]-[メニュー]2 ページ目[サポート]で表示できます。

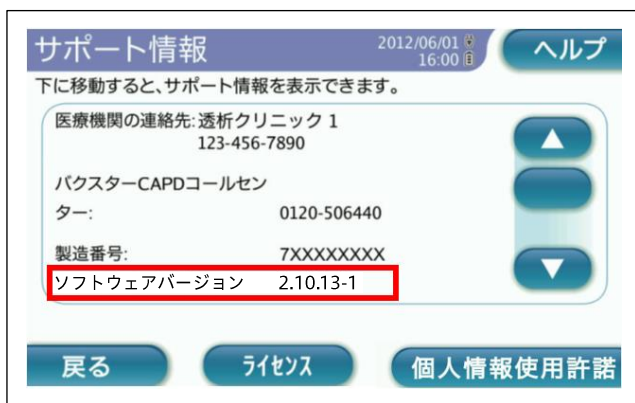

「ソフトウェアバージョン 2.10.13-1」と表示されていれば、改善されたソフトウェアバージョン(SW2.10.13-1)へのソフトウェア更新が完了しています。

- ② シェアソース：当該患者のフラグをクリック(かぐやの治療結果)-装置の情報で確認できます。



「装置のソフトウェアバージョン 2.10.13-1」と表示されていれば、改善されたソフトウェアバージョン(SW2.10.13-1)へのソフトウェア更新が完了しています。

品番	販売名	承認番号	クラス分類	特定保守管理医療機器	一般的名称	特定診療報酬算定医療機器区分/特定保険医療材料 (機能区分コード及び機能区分名)	対応する診療報酬項目
T5C8500	ホーム PD システム かぐや	22800BZX00454000	Ⅲ、高度管理医療機器	該当	自動腹膜灌流装置	自動腹膜灌流装置	C 155 自動腹膜灌流装置加算
5C9400	シェアソース	22800BZX00345000	Ⅲ、高度管理医療機器	該当なし	腹膜透析用治療計画プログラム	—	—

問合せ先

バックスター株式会社 透析製品事業部
電話番号：03-6204-3700