

充填操作方法

バクスターインフューザー SV シリーズ
(ボトルタイプ)・LV シリーズの薬液充填
方法を順にご説明します。

ルアーロック型注射筒(シリンジ)又は
注入器を使用して、薬液充填口から薬液を
注入し、本品に充填します。

全ての操作は無菌的方法によって行ってくだ
さい。

充填時には注射針を使用しないでください。



実際の機器は写真と異なる場合があります。

*薬液が流れない場合の対処方法

- 1 本品の末端部ルアーロックにルアーアダプター又は三方活栓を取り付けます。
- 2 三方活栓の他の接続部又はルアーアダプターに10 mL 以下のシリンジを取り付けます。三方活栓が「開いている」状態であることを確認してください。
- 3 シリンジのプランジャーを引いて吸引します。シリンジ内に薬液を確認するまで、吸引し続けます。
- 4 使用前に、薬液が流れており、チューブに空気がないことを目視で確認してください。翼状ルアーキャップを元の位置に取り付けます。

注意事項


・本品の使用は1回のみに限ります

使用上の注意の一覧については添付文書を参照してください。

バクスターインフューザー SV シリーズ (ボトルタイプ)・LV シリーズ

まず初めに翼状ルアーキャップ
が緩んでいないことをご確認ください。


- 1 チューブから紙のテープを外し、チューブを伸ばします。薬液充填口キャップを取り外します。後で使用するので保管しておいてください。

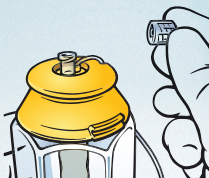


- 2 必要な薬液をシリンジに充填します。^{1,2} プライミングを行って、空気を完全に除去してください。シリンジに注射針を取り付けしないでください。



- 3 薬液充填口にシリンジ又は注入器を挿入し、時計方向に回してロックします。^{1,3}

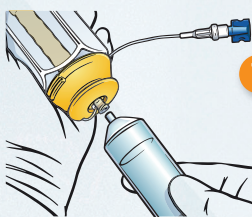


- 4 充填したシリンジのプランジャーの先端を水平な作業面に当てます。本品を垂直に立て、シリンジの外筒又はつばを掴み、シリンジをゆっくりと下方に押し、パルーンリザーバーに薬液をゆっくりと押し込みます。充填中に本品の外筒を握らないでください。

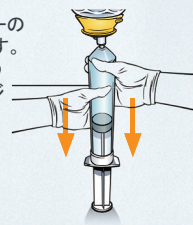


手順2～4を繰り返し、最小
充填量以上最大充填量以下の
薬液を充填します。^{4,5,7}


- 5 薬液充填口からシリンジ又は注入器を取り外します。^{3,6}
薬液充填口キャップを元の位置に取り付けます。

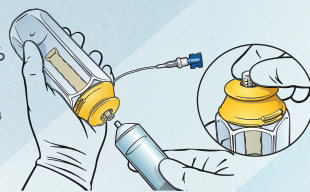


- 6 翼状ルアーキャップを取り外し、本品のプライミングを開始します。

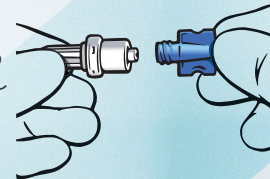

- 7 使用前に、薬液が流れており、チューブに空気がないことを目視で確認してください。薬液が流れない場合は、下記の対処方法*を行ってください。

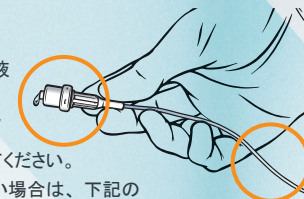

- 8 翼状ルアーキャップを元の位置に取り付けます。

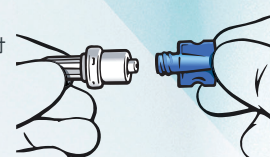

¹ 薬剤の調製及び保管上の注意については、医薬品の添付文書を参照してください。

² 本品の流速は、薬液の粘度の影響を受けます。適正な希釈液については、医薬品の添付文書を参照してください。

³ 慎重にロックしてください。過度に締め付けると薬液充填口を損傷するおそれがあります。

⁴ 製品ごとの充填量の制限については、添付文書を参照してください。

⁵ 規定充填量よりも充填量を減らすと、規定より流速が速まり、注入時間が短くなるおそれがあります。規定充填量よりも充填量を増やすと、注入時間が長くなるおそれがあります。

⁶ パルーン内の小さな気泡は、通常に発生することがあるので、取り除こうとしないでください。

⁷ 本品は規定充填量に薬液量を加えた量を充填した場合、全注入時間として公称充填量±10%の精度で持続的に薬液を流出するように設計されています。

