

プログラム 2. 疾病治療用プログラム
高度管理医療機器 腹膜透析用治療計画プログラム 41049003「シェアソース」の付属品
MyPD (患者用モバイルアプリケーション)

*【形状・構造及び原理等】

本品は (以下「MyPD」とする)、「シェアソース」(本体) の付属品であり、本体と組み合わせて使用する。「MyPD」は携帯情報端末にインストールして医師の指導のもと使用する。詳細については、本体の電子添文を参照すること。

項目	内容
処方表示 (CAPD)	「シェアソース」から取得したCAPD処方を表示する。また、処方に変更された場合は通知を出す。 交換回数、透析液の種類・濃度・容量、推定除水量、想定する交換間隔
交換情報入力 (CAPD)	実際のバッグ交換情報を入力し、結果を「シェアソース」に送信する。 透析液の種類・濃度・容量 (変更した場合)、注排液の開始・終了時刻、排液量 自動計算される項目: 注液時間、貯留時間、排液時間
バイタル入力 (APD及びCAPD)	患者バイタルのうち医療従事者が指定した項目を入力し、結果を「シェアソース」に送信する。 ※Bluetoothを内蔵した対応する測定機器とペアリングすることにより自動的に入力することを選択できる。
治療結果表示 (APD及びCAPD)	治療結果を「シェアソース」より取得し、データ及びグラフ表示する。 ・APD交換情報 (過去一週間のAPD装置データを表示) 治療ステータス、日付、除水量 ・履歴 (過去90日の選択した日の治療結果を表示) APD: 除水量、バイタル CAPD: 除水量、透析液の種類・濃度・容量、注液時間、注液量、貯留時間、排液時間、排液量、バイタル ・チャート (除水及びバイタルのトレンドグラフを表示)

【使用方法等】

動作環境及び事前準備

「MyPD」はiOS 13.2.3以降又はAndroid 9.0以降が動作している携帯情報端末で使用可能である。「MyPD」との対応が確認されたOS及び携帯情報端末については「MyPD」の取扱説明書を確認のこと。

使用方法

「MyPD」は、患者がアプリケーションストアからダウンロードし、医療従事者が「シェアソース」に患者ユーザーを登録した後に使用可能となる。

- ログイン
メールアドレス及びパスワードでログインする (生体認証も利用可能)。
- 機能の使用
入力する目的に対応するタブを選択し、画面に従って機能を利用する。
(ホーム) タブ
・治療の進捗状況、次のアクション、通知などを表示する。
(バイタル) タブ
・体重や血圧などのバイタル指標を記録する。
(交換) タブ
・CAPDの交換データを記録、APDの交換データを表示する。
(治療) タブ
・処方、治療結果及びチャートを表示する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 「MyPD」の処方変更は、即時受信するように設計されている。ログインしていない場合は、次に患者がログインしてから受信される。変更後の処方は次回の治療から適用される。「MyPD」の使用にあたり、以下の内容で患者に指導すること。
- 登録済みメールアドレス、パスワードを共用せず、安全に管理すること。
- 複数の携帯情報端末で同時にログインしないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 「MyPD」の使用にあたり、以下の内容で患者に指導すること。
- 「MyPD」はクラウドのデータセンターにインターネット経由で接続して使用する。情報セキュリティに注意し、「MyPD」の取扱説明書にしたがってアクセスすること。携帯情報端末の常駐セキュリティ機能は「MyPD」とは干渉しない。
 - ログインをすると3日間ログイン状態を保持することができる。ログイン状態を保持する際には、必要に応じ携帯情報端末に備わっているセキュリティ機能を利用してアクセス管理を行うこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (輸入元):
株式会社ヴァンティブ
電話番号: 03 (4595) 4750

製造業者：

バクスターヘルスケア社（アメリカ合衆国）

Baxter Healthcare Corporation

本品に関する問い合わせ窓口：

ヴァンティブ CAPDコールセンター

電話番号：0120-506 440